

PRŮVODCE FARMÁŘE

MLEZIVO



Kvalita


Pro maximální podporu zdraví a produktivity telat je nezbytné, aby tele přijalo správné množství nejvyššího mléka ve správný čas.

Značný počet krav produkuje méně kvalitní mléko, zejména jalovice. Nicméně, s dobrým managementem krmení a díky vakcinačním programům, jsou nyní i jalovice schopné poskytnout kvalitní mléko, takže kontrola kvality je na prvním místě.

Kontrola

Zcela jistě nestačí posoudit kvalitu mléka pouze senzory – i když vypadalo husté a žluté, může být nestandardní.

Kolostrometr vám může pomoci rychle a jednoduše posoudit kvalitu mléka.

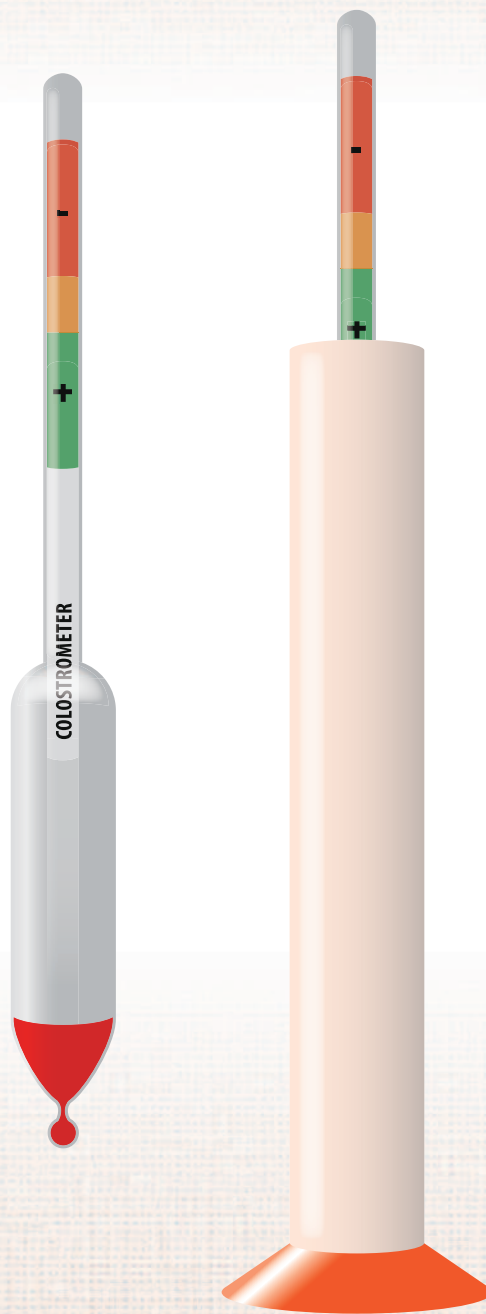


volac

FEED FOR
GROWTH

Použití kolostrometru

- dejte vzorek mleziva do čistého válce kolostrometru
- dodržte pokojovou teplotu při měření – cca 20–22 °C pro zajištění přesnosti měření. Pokud je příliš vysoká teplota, výsledek bude zkreslený v neprospěch množství protilátek
- zabraňte napěnění mleziva, znesnadnilo by to odečet výsledku na stupnici
- plovák ponořte do mleziva
- pokud se stupnice pohybuje v **zelené** části, pak je mlezivo **dobré kvality a můžeme jím napojit novorozená telata co nejdříve (ideálně do 2 hodin po narození), nebo ho uskladnit**
- pokud se stupnice pohybuje v **oranžovém** poli, kvalita je **průměrná a není toto mlezivo vhodné pro novorozená telata, zkrmte ho telatům ve stáří 2–3 dnů**
- stupnice v **červeném** poli znamená **nekvalitní mlezivo a nemělo by se krmit telatům od 0 do 3 dnů věku**
- mlezivo dobré kvality můžeme uchovat v chladničce po dobu **7 dnů** a zamrazit lze na dobu až **1 roku**
- mlezivo je třeba zchladit či zamrazit do 1–2 hodin po nadojení, v případě vystavení pokojové teplotě se zdvojnásobuje počet nežádoucích bakterií každou půlhodinu

Kolostrometr se pohybuje v **zeleném** poli a znamená dobrou kvalitu

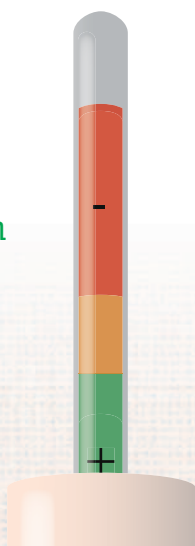

Kolostrometr se pohybuje v **červeném** poli a znamená nedostačnou kvalitu

